





PRO M CLASS

Универсальный портативный
микромотор

*Ортодонтия, эндодонтия,
имплантология и гигиена
в одном устройстве*

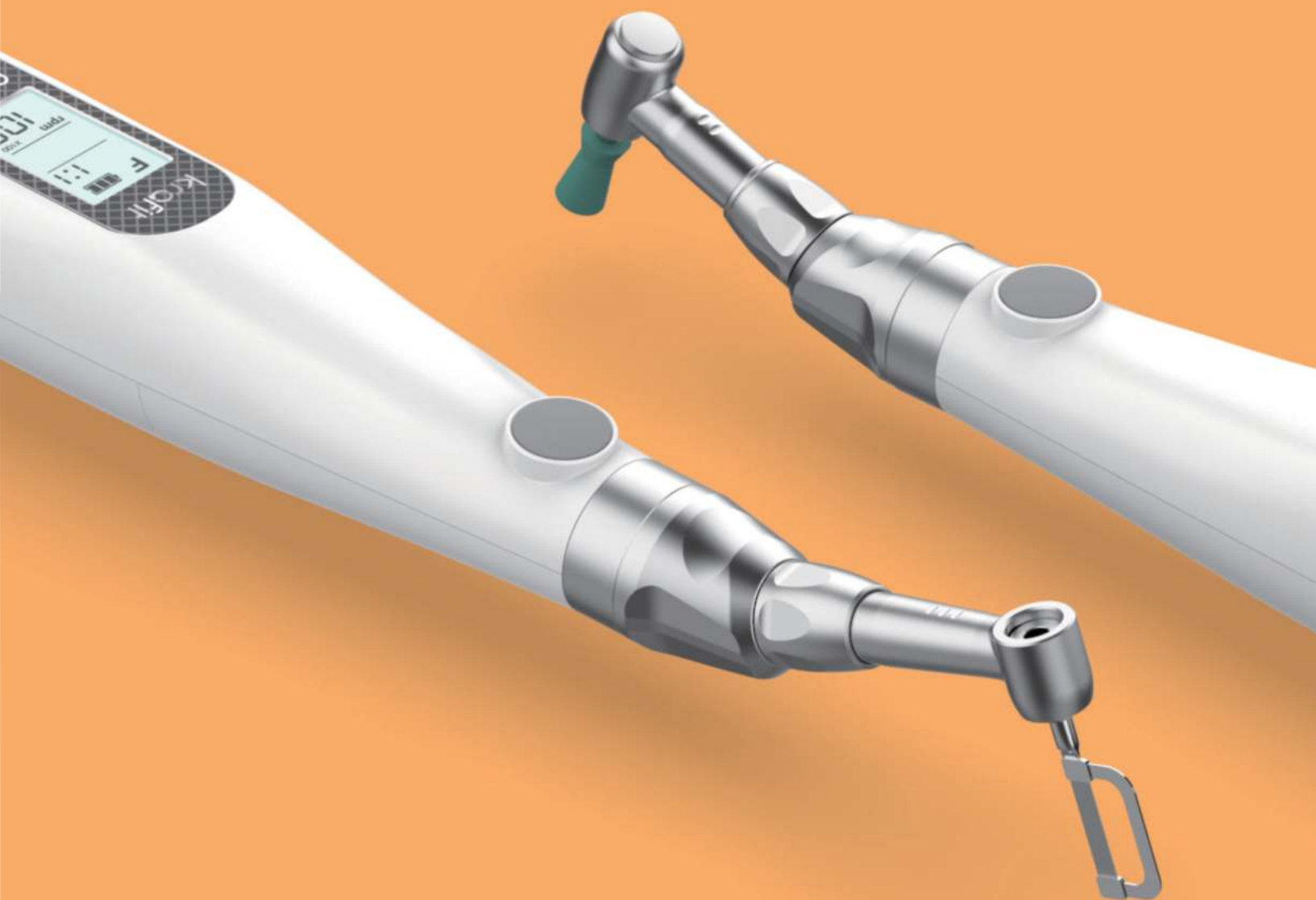

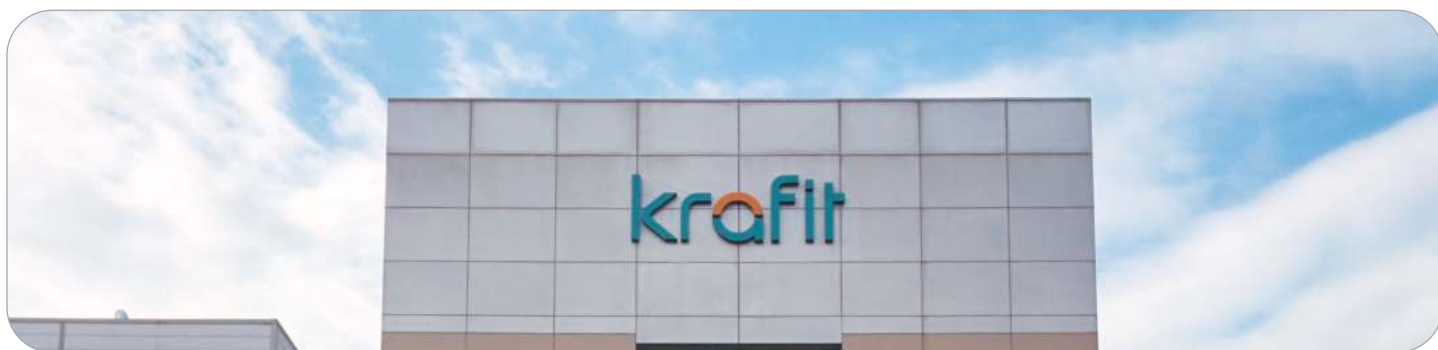

Представляем SAEYANG

Компания Saeayang, основанная в 1976 году, специализируется на производстве микромоторов и наконечников для использования в зуботехнических лабораториях и стоматологических клиниках. За годы деятельности компания заслужила положительную репутацию не только в Южной Корее, но и более чем в 100 странах мира.

Главные приоритеты компании Saeayang – это высокое качество выпускаемой продукции и удовлетворение потребностей клиентов. Внедряя передовые технологии, компания фокусируется на разработке новой продукции и ежегодно запускает в производство не менее двух новых моделей.

Компания каждый год принимает участие в крупнейших зарубежных выставках в США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Италии, Гонконге, Китае и поддерживает доверительные отношения с клиентами, экспортируя свою продукцию в более чем 100 стран мира.

Головной офис
компании



Фабрики компании



Производственная
линия



PRO M CLASS

Система всё в одном

Беспроводной микромотор
5 передаточных отношений (1:1, 4:1, 16:1, 160:1, 320:1)
Перезаряжаемая литий-ионная батарея
Проводная зарядка (C тип)
Время полной зарядки всего 90 минут



С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО МИКРОМОТОРА ВОЗМОЖНО ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ОБРАБОТКИ
Его можно использовать в различных процедурах, изменяя угол наклона и передаточное отношение




Наконечник
SO-OT6



Разделение и
резка



Наконечник
TD-160

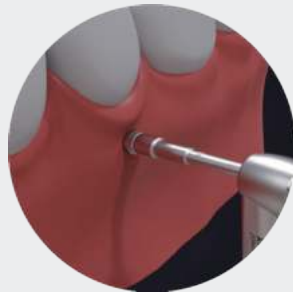

Установка
мини-имплантов

ОРТОДОНТИЯ




Наконечник
SC-R04
(винтовой тип)



Наконечник
SPC-R04
(нажимной тип)



Наконечник
PR-04

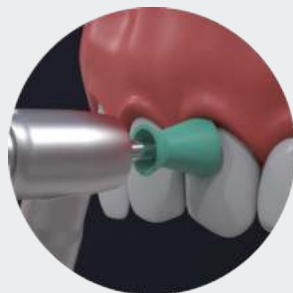

Полировка
и очистка

ГИГИЕНА



Наконечник
SP-RA16M



Обработка корневых
каналов

ЭНДОДОНТИЯ



Наконечник
TD-320



Установка имплантов и
контроль торка

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

PRO M CLASS

Компактность и эргономичность


Уникальное сочетание компактности, легкого веса, эргономичности и функциональности в одном устройстве



БЛАГОДАря ПРОДУМАННОЙ ЭРГНОМИКЕ И ЛЕГКОМУ ВЕСУ, ВОЗМОЖНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ УСТАЛОСТИ

БЕСПРОВОДНОЙ

PRO M CLASS - это беспроводной прибор, который можно свободно перемещать во время процедуры, что снижает утомляемость операторов

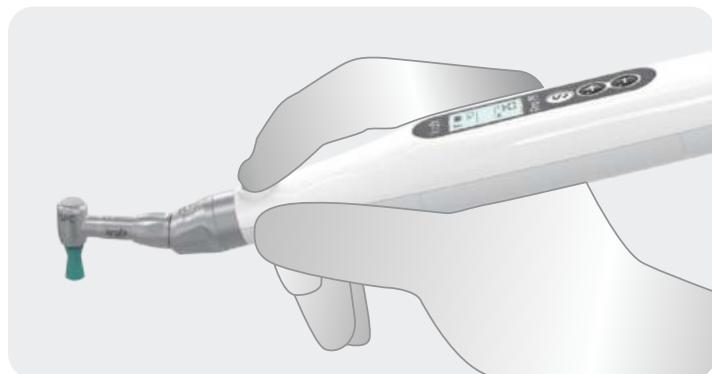

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ C-TYPE

PRO M CLASS можно заряжать с помощью высокосовместимого кабеля C-TYPE



ПОРТАТИВНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

PRO M CLASS комплектуется компактной и удобной подставкой/зарядной станцией.



СИСТЕМА СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ

Вставьте распылительную насадку в заднюю часть углового наконечника и смазывайте до тех пор, пока масло не начнет вытекать из насадочной головки, что составляет примерно 2-3 секунды. Насадка должна располагаться вертикально, чтобы вытекло все лишнее масло, затем протрите внешнюю поверхность.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ МИКРОМОТОРА

PRO M CLASS

Направление вращения

F

Уровень заряда батареи

Передаточное отношение

1:1

Торк

N·cm

88

Скорость вращения

rpm X100

100

LCD Дисплей

Вращение

Батарея

Заряжена

2/3

1/3

Разряжена

Торк

88

Вращение

F По часовой стрелке

R Против часовой стрелки

Передаточное отношение

160:1 4:1 1:1

320:1 16:1

Скорость вращения

188

Кнопка включения / выключения

Кнопка выбора режима работы

Кнопка +

Кнопка -

Батарейный отсек

Разъём для зарядки

№	Клавиши и разъёмы	Назначение
1	Клавиша вкл/выкл	Включение / выключение питания микромотора. Запуск или остановка работы наконечника.
2	Клавиша выбора режима работы	При каждом нажатии кнопки активируются настройки направления вращения, передаточного числа, крутящего момента и скорости вращения. Как только настройка активирована, начинает мигать соответствующий значек.
3	Клавиши + и -	Изменение значения настроек
4	Батарейный отсек	Батарейный отсек закрыт крышкой. *Пользователь НЕ может заменить аккумулятор.
5	Разъём зарядки	Подключите кабель для зарядки TYPE C.

Станция для зарядки

Индикатор зарядки

Разъём для подключения адаптера питания TYPE C

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМОТОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

PRO M CLASS



Модель	Блок управления PRO M CLASS
Перезаряжаемая батарея	Li-Ion, 3.7В, 800 мА
Вес	86.5 г
Габариты (мм)	Ш 26.6 x Г 27.2 x В 145.1






Модель	Зарядное устройство PRO M CLASS
Вес	97.5 г
Габариты (мм)	Ш 81.4 x Г 103.7 x В 46.7



Модель	Адаптер питания PRO M CLASS
Электропитание (вход)	100-240В, 50/60Гц, 0.6А
Электропитание (выход)	5В 1.2А
Вес	104.0 г
Габариты (мм)	Ш 43.5 x Г 74.0 x В 36.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ / ИНДИКАЦИИ ЗАРЯДКИ

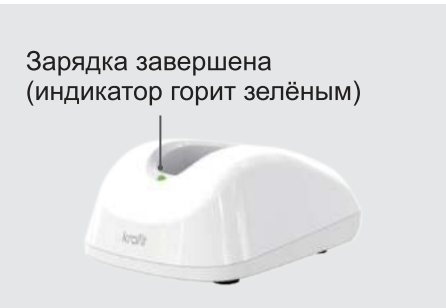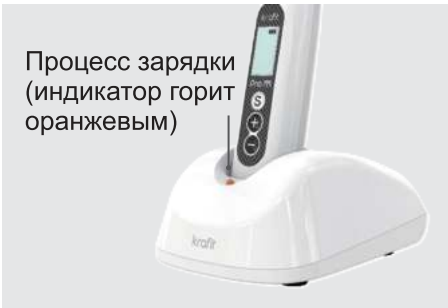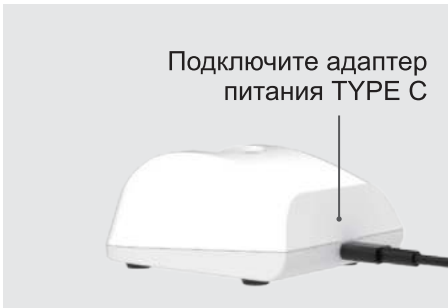


⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКРОМОТОРА

PRO M CLASS

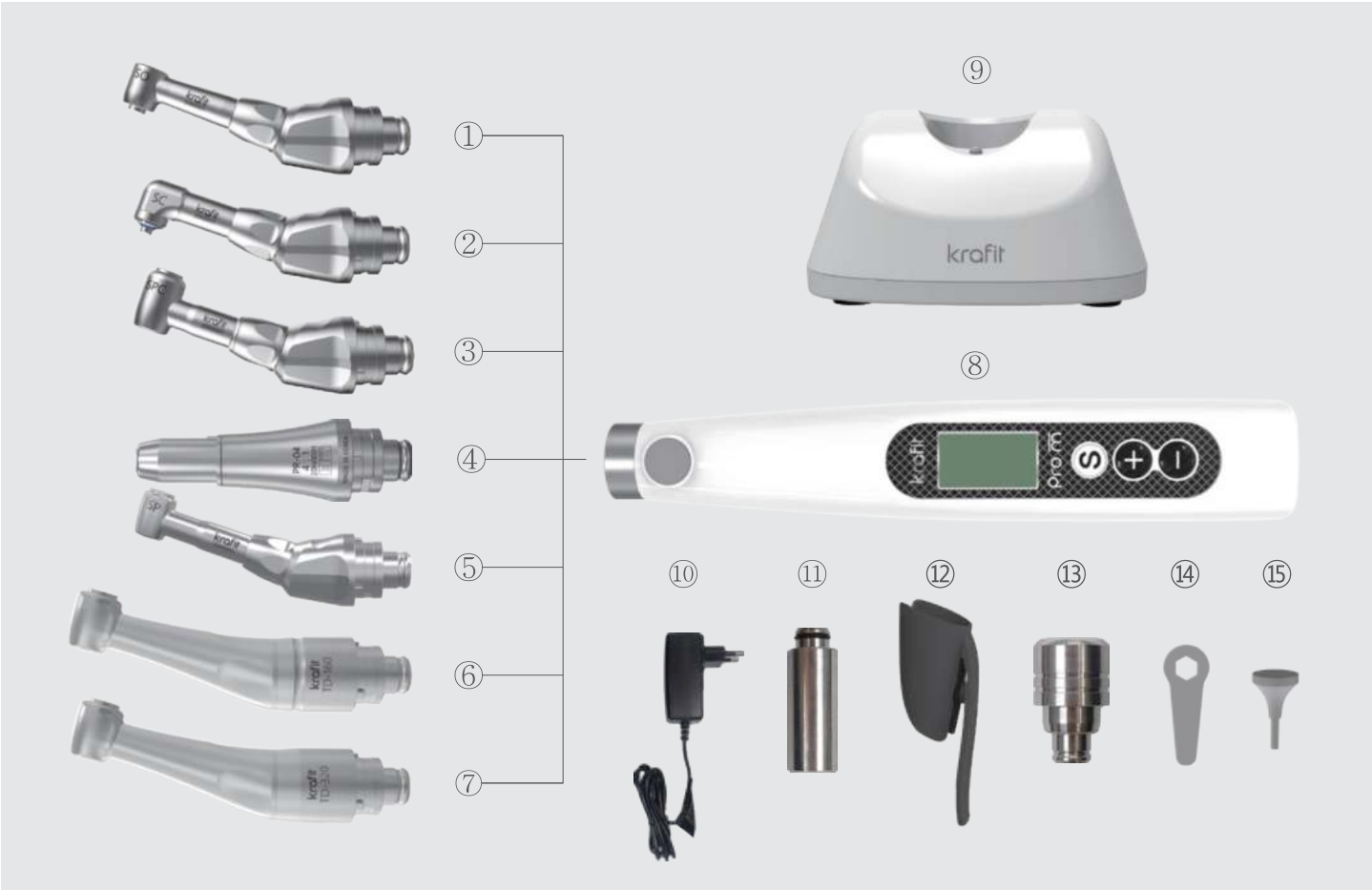

№	Наименование	Функция	Группа
1	Угловой наконечник (SO-OT6)	Передаточное отношение 1:1	Аксессуары
2	Угловой наконечник (SC-R04)	Передаточное отношение 4:1 (Винтовой тип)	
3	Угловой наконечник (SPC-R04)	Передаточное отношение 4:1 (Кнопочный тип)	
4	Угловой наконечник (PR-04)	Передаточное отношение 4:1	
5	Угловой наконечник (SP-RA16M)	Передаточное отношение 16:1	
6	Угловой наконечник (TD-160)	Передаточное отношение 160:1	
7	Угловой наконечник (TD-320)	Передаточное отношение 320:1	
8	Блок микромотора	Управление скор. вращ., крут. моментом и т.д.	Комплектующие
9	Зарядная станция	Зарядная станция для блока микромотора	
10	Адаптер питания	Адаптер питания для зарядной станции	
11	Распылительная насадка	Насадка для облегчения смазывания наконечника	Съёмные комплектные детали
12	Рычаг переключения	Для удобства включения/выключения двигателя	
13	Заглушка	Защищает разъём двигателя от загрязнения	
14	Гаечный ключ	Для сборки/разборки угловых наконечников	Для SC-R04
15	Устройство для извлечения инструментов	Используется для извлечения вращающегося инструмента	Для SO-OT6

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКОВ

ГИГИЕНА

Полировка и очистка	
Модель	SC-R04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	34,0
Габариты (мм)	Длина 59,8 x Ø16,7

ГИГИЕНА

Полировка и очистка	
Модель	SPC-R04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	35,0
Габариты (мм)	Длина 59,7 x Ø16,7


ГИГИЕНА

Полировка и очистка	
Модель	PR-04
Передаточное отношение	4:1
Максимальная скорость (об / мин)	2,500
Вес (г)	36,0
Габариты (мм)	Длина 55,5 x Ø16,7

ОРТОДОНТИЯ

Разделение и резка	
Модель	SO-OT6
Передаточное отношение	1:1
Максимальная скорость (об / мин)	10,000
Вес (г)	35,5
Габариты (мм)	Длина 62,1 x Ø16,7

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

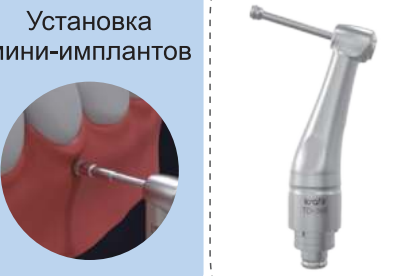Установка мини-имплантов	
Модель	TD-160
Передаточное отношение	160:1
Максимальная скорость (об / мин)	70
Вес (г)	66
Габариты (мм)	Длина 75,2 x Ø16,9


ИМПЛАНТОЛОГИЯ, КОНТРОЛЬ ТОРКА

Контроль торка	
Модель	TD-320
Передаточное отношение	320:1
Максимальная скорость (об / мин)	25
Вес (г)	65,5
Габариты (мм)	Длина 75,2 x Ø16,9

ЭНДОДОНТИЯ

Обработка корневых каналов	
Модель	SP-RA16M
Передаточное отношение	16:1
Максимальная скорость (об / мин)	600
Вес (г)	34,0
Габариты (мм)	Длина 63,6 x Ø16,7

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАКОНЕЧНИКА

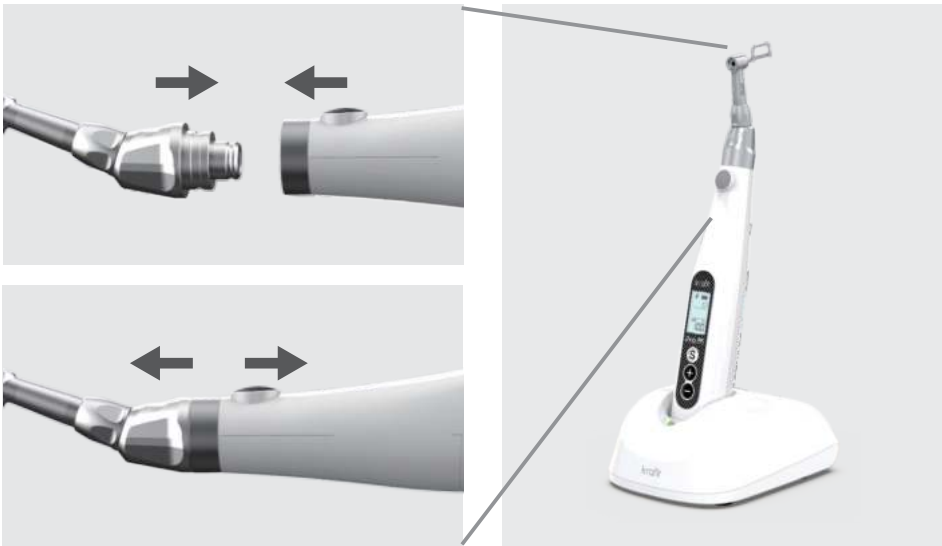

⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

LUBRICANT Oil

Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников Krafit.

Внимание!


Смазка необходима после каждого использования и перед стерилизацией.
Не переворачивайте баллон дном вверх.
В этом случае вместо масла выбрасывается только распыляемый газ.
Во избежание отсоединения головки от распылительной насадки - надежно ее удерживайте.



Используйте насадку для спрея смазки из комплекта наконечника



Насадка для спрея смазки

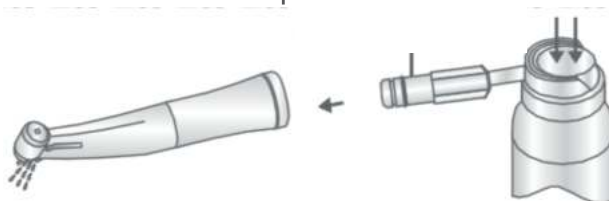

Состав: синтетическое масло с максимальной степенью очистки.

Объём: 300мл.

Артикул: **SMT-lubr**

Применение:

- Используйте насадку для спрея-смазки из комплекта наконечника.
- Встряхните баллон со спреем-смазкой для стоматологических наконечников около 10 раз для смешивания содержимого. Установите на носик баллона насадку для спрея-смазки.
- Вставьте насадку в наконечник (к Е-муфте, со стороны микромотора).
- Нажмите на распылитель 2-3 секунды. Излишки спрея будут выдуваться через цанговый узел. Направьте на салфетку и осмотрите пятно на наличие загрязнений.
- Если наконечник загрязнен отверните ключом гайку и отделите головную часть от редуктора.
- Промойте отделенную головную часть проточной водой или в ультразвуковой мойке.
- После чистки протрите головную часть, обсушите внутри воздухом от воды и смажьте.



Собери свой Pro M Class

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ: МИКРОМОТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ PRO M CLASS



В комплекте с
1 наконечником

В комплекте с
2 наконечниками

Возможны любые
комбинации наконечников



ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ



Наконечник **SP-RA16M**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SP-RA16M**



ДЛЯ ОРТОДОНТИИ



Наконечник **SO-OT6**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SO-OT6**



ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



Наконечник **TD-320**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-320**




ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



Наконечник **TD-160**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-160**

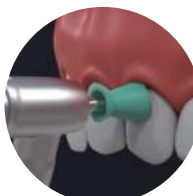


ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **SPC-R04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SPC-R04**

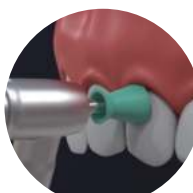


ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **SC-R04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SC-R04**

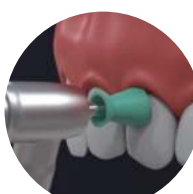


ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Наконечник **PR-04**

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04**

НАБОР ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

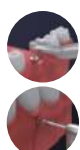

Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
TD-160/TD-320**



НАБОР ДЛЯ ГИГИЕНЫ №1



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
SC-R04/SPC-R04**



НАБОР ДЛЯ ГИГИЕНЫ №2



Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04/SPC-R04**



НАБОР ДЛЯ ГИГИЕНЫ №3




Артикул
комплекта:
**PRO M Class/
PR-04/SC-R04**



⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

saeyang SAEYANG Co., Ltd.

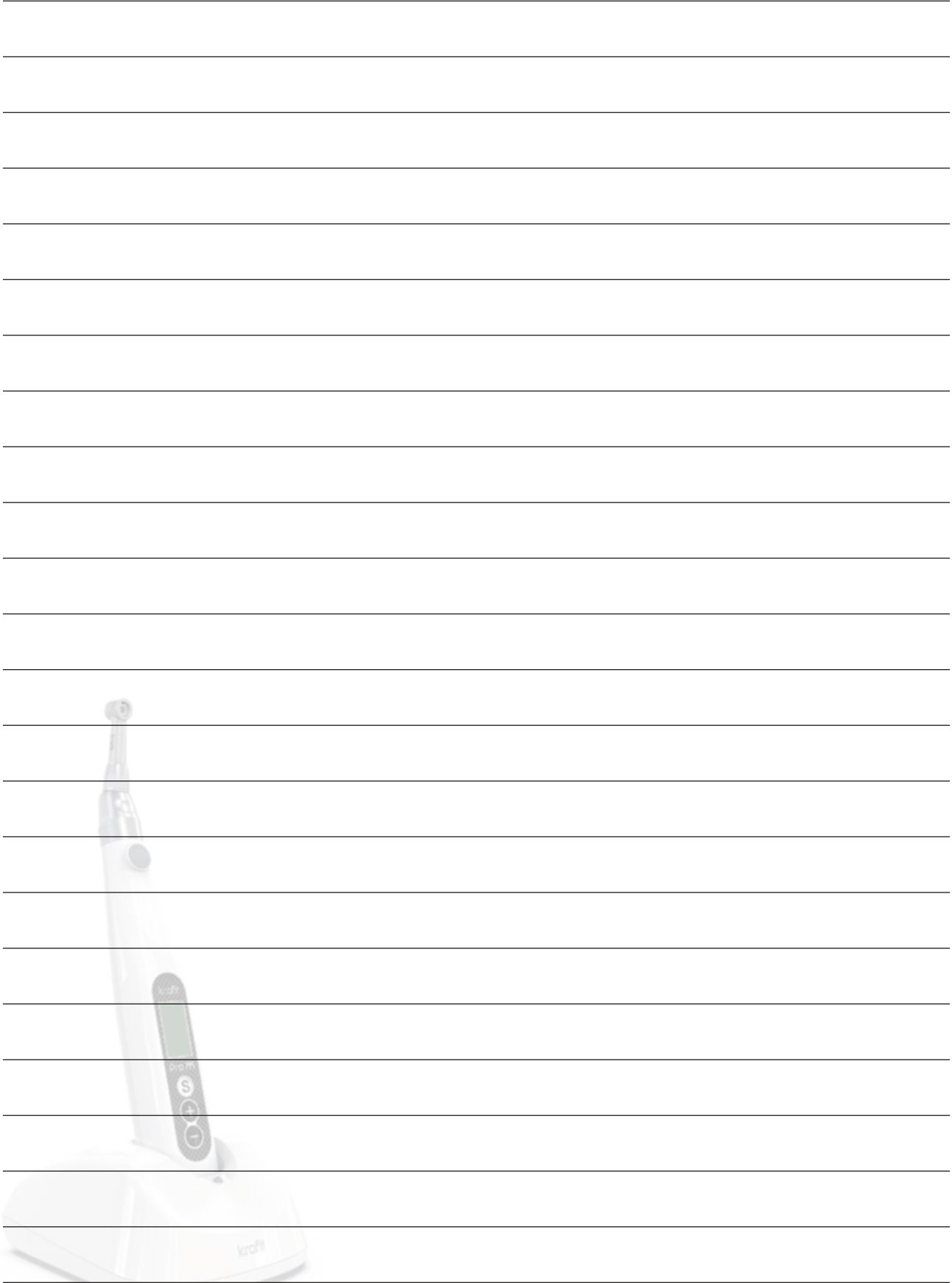

saeyang krait

PRO M CLASS



Dental-East

**Стоматологические
оборудование и материалы**

ООО «Дентал-Ист» 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А.

Тел./Факс: 8 (800) 222-77-05 (многоканальный), (499) 458-67-37,

(499) 458-73-27, (499) 745-63-16, (499) 745-63-20.

E-mail: sales@dental-east.ru, Сайт: www.dental-east.ru

Ред. №1 Сентябрь 2024г.



Наш партнёр
интернет-магазин
a3-dent.ru

оборудование и материалы
для стоматологии
A3·DENT.RU



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.