



Сделано  
в Корее

2026

ver. 02  
Русский

# Гипсы, паковочные и альгинатные массы

Каталог продукции  
ред. №2 Февраль 2026г

PROFESSIONAL  
**SNOW ROCK**™

YOUR BEST DENTAL CHOICE

**snow-rock.ru**



---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

О компании «DK Mungyo» -----	стр. 1
О компании «Дентал-Ист» -----	стр. 2
О ЗТЛ «Атридент» -----	стр. 3

### **Гипсы:**

Гипс для лабораторий (4 класса) -----	стр. 4
Гипс для лабораторий (3 класса) -----	стр. 5
Гипс для лабораторий (2 класса) -----	стр. 6
Протокол применения гипсов -----	стр. 7

### **Паковочные массы:**

Паковочные массы для лабораторий -----	стр. 8
Протокол применения паковочных масс ---	стр. 9

### **Альгинатные массы:**

Альгинатные массы для клиник -----	стр. 10
Протокол применения альгинатных масс -	стр. 11

Для заметок -----	стр. 12
-------------------	---------

Сертификаты на продукцию DK Mungyo --	стр. 13
---------------------------------------	---------

---



# Послание от президента компании DK Mungyo

## Дорогие клиенты, партнёры и друзья!

80 лет – это бесценный опыт. Каждый день мы применяем все, что наработали и чему научились за эти годы, совершенствуем свое производство, чтобы сделать лучший продукт!

Благодарю вас за выбор нашей компании! В этом каталоге (как и на сайте snow-gosk.ru) мы подготовили для вас информацию о нашем обширном опыте и уникальных разработках в производстве гипсов, паковочных масс.

Наш путь начался в 1946 году с производства канцелярских принадлежностей. Тогда мы стали первым производителем подобных товаров в Пусане. А в 1980 году мы запустили производство стоматологических гипсов. С тех пор команда MUNGYO делает все возможное, чтобы повышать качество обслуживания и приносить максимальную пользу нашим клиентам, проводить разработки и улучшать технологии производства. Таким образом, MUNGYO превратилась в лидера индустрии гипсовых материалов как в Южной Корее, так и за ее пределами, став международной компанией. В декабре 2025г открыт завод в Индонезии.

Непрерывный поиск новых технологических разработок, внедрение лучших мировых практик и высокий уровень технической квалификации персонала - создали репутацию бренда MUNGYO, который заслужил доверие клиентов во всем мире. Благодаря этому, компания каждый год открывает новые горизонты, получает международные награды, что подтверждает неизменное качество производимых товаров. Постоянное совершенствование технических знаний, максимальное использование организационных возможностей и локализация производства демонстрируют развитие и рост компании.

Следуя этому пути, мы в компании MUNGYO планируем отметить свое 100-летие, оставаясь компанией, которая с любовью относится к клиентам и смело смотрит в будущее. Разрабатывая решения для улучшения вашей профессиональной деятельности, мы осуществим нашу мечту - быть всемирно признанной корпорацией, которая заслуживает доверия клиентов.

В заключение хочу выразить вам огромную благодарность за многолетнее сотрудничество и поддержку. Желаю вам дальнейших успехов!



С уважением,  
**Алекс Нам**

Генеральный директор  
MUNGYO Group

## С 1946г



При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

# Дентал-Ист *35 лет надёжных поставок и современных стоматологических решений в России*

## *Здравствуйтесь, уважаемые клиенты и партнёры!*

Компания «Дентал-Ист» более 35 лет успешно работает на стоматологическом рынке России. Мы объединяем передовые технологии, качественные материалы и профессиональный опыт, обеспечивая клиники и лаборатории современными решениями по доступным ценам. Нам удалось построить устойчивую репутацию надёжного поставщика. Долгосрочное сотрудничество с ведущими производителями Японии и Южной Кореи заложило основу качеству и доступности продукции, которую мы предлагаем нашим клиентам.

Собственная зуботехническая лаборатория и фрезерный центр проводят испытания всех новинок, прежде чем мы выводим их на рынок. Оказывает услуги изготовления протезов любой сложности из современных материалов.

Мы сотрудничаем с известными международными лекторами. Их опыт позволяет повышать квалификацию врачей-стоматологов и зубных техников. Для этого мы регулярно организуем различные учебные мероприятия: от вебинаров до мастер-классов. Мы активно взаимодействуем с учебными заведениями, обеспечивая их научно-практической базой, повышая качество образования.

Сервисная служба, которая осуществляет гарантийное и послепродажное обслуживание, помогает создавать понятные инструкции для пользователей.

За эти годы нам удалось подготовить не одно поколение опытных менеджеров, которые постоянно стажировались и накапливают опыт, чтобы общаться с клиентами на одном языке.

Наша компания работает как с клиентами из России, так и из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. А для улучшения логистики и качества обслуживания мы открыли представительство в Республике Казахстан, где организован офис продаж и склад.

Наш приоритет - подобрать оптимальное решение для наших клиентов в кратчайшие сроки с минимальными затратами и оказать всестороннюю поддержку.

### *Директор компании «Дентал-Ист»*



*Афанасьев Алексей Николаевич*

### *Наша продукция*



### *Головной офис компании «Дентал-Ист»*



### *Проводим учебные курсы*



### *Участвуем в выставках*



2

 При заказе ориентируйтесь по наименованию и артикулу. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.



Зуботехническая лаборатория

**ATRIDENT**

# Зуботехническая лаборатория «Атридент»

Добрый день, уважаемые доктора и зубные техники.

Меня зовут **Константин Шайбаков**. Я - зубной техник с многолетним опытом работы и управляющий зуботехнической лабораторией «Атридент», специализирующейся на изготовлении ортопедических и ортодонтических конструкций высочайшего качества. Мы объединяем передовые технологии, опыт квалифицированных специалистов и строгий контроль на каждом этапе производства, чтобы обеспечить пациентам безупречный результат.

## Что мы изготавливаем:

- Коронки (металлокерамическая, циркониевая, цельнокерамическая).
- Виниры и люминиры.
- Мостовидные конструкции любой сложности.
- Съёмные и условно-съёмные протезы.
- Временные конструкции.
- Ортодонтические аппараты и каппы.
- Индивидуальные абатменты и элементы имплантологии.

## Врачи выбирают нас!

### Цифровые технологии:

Мы работаем на CAD/CAM оборудовании, используем 3D-сканирование и современные методы моделирования. Это обеспечивает точность и предсказуемость результата.

### Качественные материалы:

Применяем сертифицированные материалы от ведущих мировых производителей — для надёжности, эстетики и долговечности конструкций.

### Контроль на каждом этапе:

Каждое изделие проходит многоступенчатую проверку: от первичного моделирования до финальной проверки. Это исключает любые дефекты и обеспечивает комфорт для пациента.

### Индивидуальный подход:

Мы учитываем клинические задачи врача и особенности пациента, чтобы результат полностью соответствовал ожиданиям.

### Соблюдение сроков:

Мы понимаем, насколько важны сроки для клиники, поэтому процессы в лаборатории выстроены чётко и без компромиссов по качеству.

## Руководитель лаборатории «Атридент»



*Шайбаков Константин Андреевич*



## Лучшее оборудование



## Современные материалы

## Почему выбирают SNOW ROCK (от компании DK MUNGYO CORPORATION, Республика Корея).

В современной зуботехнической практике точность передачи анатомии играет решающую роль. Гипс **SNOW ROCK** — это надёжный материал, который обеспечивает высокую детализацию и стабильность результатов. Он широко применяется в лабораториях на разных этапах изготовления ортопедических и ортодонтических конструкций.

**Высокая точность воспроизведения:** передаёт мельчайшие детали оттиска — микрорельеф, фиссуры и контуры десневого края.

**Минимальная усадка:** гарантирует стабильность размеров модели в процессе схватывания и дальнейшей работы.

**Прочность и устойчивость:** модели выдерживают многократные примерки и лабораторные манипуляции без сколов и деформаций.

**Комфорт в работе:** легко замешивается, не образует пузырьков, равномерно заполняет оттиск.

**Оптимальное время затвердевания:** позволяет работать уверенно и без спешки, сохраняя эффективность производственного процесса.

**SNOW ROCK — профессиональный выбор зуботехнических лабораторий по всему миру.**



При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.



+7 (499) 745-63-06



lab.a3-dent.ru



+7 (925) 255-67-54



lab@a3-dent.ru



г. Москва, Ленинградское шоссе, дом № 96 А



### DIE STONE

4 класс

#### Супергипс ультратвёрдый

Мелкодисперсный гипс высшего качества для коронок и мостов

- Сверхтвердая, стекловидная и четкая поверхность модели.
- Низкий коэффициент расширения (**0,09%**) позволяет изготовить модели и штампы в точном соответствии с заданными размерами.
- Прочностные характеристики материала предотвращают образование сколов и трещин при обработке моделей.



#### Артикул:

- 25 кг - слоновая кость: **DKM-UDP25-Ivory**
- 18 кг - слоновая кость: **DKM-UD18-Ivory**
- 1,5 кг - слоновая кость: **DKM-UD1.5-Ivory-AI**
- 25 кг - золотисто-коричневый: **DKM-UDP25-GB**
- 18 кг - золотисто-коричневый: **DKM-UD18-GB**
- 1,5 кг - золотисто-коричневый: **DKM-UD1.5-GB-AI**

### FLOW ROCK

4 класс

#### Жидкотекучий цокольный супергипс

Жидкотекучий цокольный гипс с длительным сроком службы и низким коэффициентом расширения

- Легко заливается в форму и не выпадает в осадок.
- Оптимальные свойства текучести.
- Регулируемая низкая вязкость при высокой прочности и низком расширении.
- Высокие тиксотропные свойства
- Гладкая поверхность модели без использования вибростолика.



#### Артикул:

- 25 кг - желтый: **DKM-UDFP25-YL**
- 18 кг - желтый: **DKM-UDFC18-YL**
- 1,5 кг - желтый: **DKM-UDFP1.5-YL/L**



#### Варианты поставки:

##### DIE STONE:

- коробка весом 25кг (общая упаковка, пластиковая внутренняя упаковка).
- коробка весом 18кг (12 алюминиевых упаковок по 1.5кг).
- алюминиевая упаковка весом 1.5кг.

##### FLOW ROCK:

- коробка весом 25кг (общая упаковка, пластиковая внутренняя упаковка).

#### Варианты цвета:

##### DIE STONE:



Слоновая кость



Золотисто-коричневый

##### FLOW ROCK:



Жёлтый

## DENTAL STONE

3 класс

### Сверхтвёрдый гипс

Для моделей коронок и мостов

- Зуботехнический гипс DENTAL STONE - это твердый гипс для моделей, изготовленный исключительно на основе превосходного синтетического альфа-гипса.
- Сочетает в себе прочность, точность и низкое расширение.
- Меньше сколов и поломок при обработке краев.
- Превосходная экономичность.



### Варианты цвета:



Белый Жёлтый Небесно-голубой

### Артикул:

- 25 кг - белый: **DKM-NDP25-W**
- 25 кг - желтый: **DKM-NDP25-YL**
- 25 кг - небесно-голубой: **DKM-NDP25-SB**
- 18 кг - белый: **DKM-ND18-W**
- 18 кг - желтый: **DKM-ND18-YL**
- 18 кг - небесно-голубой: **DKM-ND18-SB**
- 1,5 кг - белый: **DKM-ND1,5-W-AI**
- 1,5 кг - желтый: **DKM-ND1,5-Y-AI**
- 1,5 кг - небесно-голубой: **DKM-ND1,5-SB-AI**

## LAB STONE

3 класс

### Сверхтвёрдый гипс

Универсальный модельный гипс для артикуляции, опок, контрольных и мастер-моделей, включая модели зубных протезов

- Высокая прочность (тип 3) и превосходный эстетический вид.
- Гладкая и аккуратная поверхность с меньшим количеством пузырьков воздуха.
- Используется в лаборатории для моделирования, создания цоколя моделей, артикуляционных моделей и опок.
- Идеально подходит для изготовления моделей полных или частичных зубных протезов - легко вынимается из слепочной формы.

### Варианты цвета:



Жёлтый Небесно-голубой

### Артикул:

- 25 кг - желтый: **DKM-NDLABP25-YL**
- 25 кг - небесно-голубой: **DKM-NDLABP25-SB**
- 18 кг - желтый: **DKM-NDLAB18-YL**
- 18 кг - небесно-голубой: **DKM-NDLAB18-SB**
- 1,5 кг - желтый: **DKM-NDLAB1.5-YL**
- 1,5 кг - небесно-голубой: **DKM-NDLAB1.5-SB**



При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

## ORTHO STONE

3 класс

### Сверхтвёрдый гипс

Для ортодонтических моделей. Эстетика и диагностика с хорошей производительностью

- Ortho Stone - это гипс 3-го класса твердости по ISO, точный зуботехнический гипс экстремально белого цвета для оптимальной эстетики.
- Достоверная эстетика.
- Легкая обрезка - хорошая обрабатываемость.
- Разумная цена.

### Варианты цвета:



Белоснежный

### Артикул:

- 25 кг - белоснежный: **DKM-NDOTP25-PW**

### Варианты поставки:

#### DENTAL STONE:

- коробка весом 25кг (общая упаковка, пластиковая внутренняя упаковка).
- коробка весом 18кг (12 алюминиевых упаковок по 1.5кг).
- алюминиевая упаковка весом 1.5кг.

#### LAB STONE / ORTHO STONE / ZERO MOUNTING STONE:

- коробка весом 25кг (общая упаковка, пластиковая внутренняя упаковка).

## ZERO MOUNTING STONE 3 класс

### Гипс артикуляционный

Для изготовления цоколя моделей, учебных моделей. Высокая степень адгезии, отсутствие расширения.

- Точность прикуса при загипсовке в артикуляторе.
- Точная артикуляция благодаря нулевому расширению.

### Варианты цвета:



Белый

### Артикул:

- 25 кг - белый: **DKM-DPZMC25-White**

## DENTAL PLASTER

2 класс

### Твердый гипс

Для цоколей моделей, артикуляторов, учебных моделей

- Идеален для изготовления протезов методом термоинжекции.
- ГИПС DENTAL PLASTER предназначен для изготовления опок и учебных моделей благодаря низкому коэффициенту расширения.
- Использование опок при изготовлении зубных протезов.
- Подходит для учебных моделей, вместо стандартных моделей из акрила.
- Белый гипс с превосходной экономичностью, разработан для различных целей при использовании в зуботехнических лабораториях.

### Варианты поставки:

- мешок 25кг (общая упаковка, пластиковая внутренняя упаковка).

### Варианты цвета:



Белый



### Артикул:

25 кг - белый: **DKM-DP25-White**




6

**⚠ При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.**


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Наименование	DIE STONE (4 класс)		DENTAL STONE (3 класс)				DENTAL PLASTER (2 класс)
	Гипс DIE STONE	Гипс FLOW ROCK цокольный	Гипс DENTAL STONE	Гипс LAB STONE	Гипс ORTHODONTIC ROCK	Гипс ZERO MOUNTING STONE артикуляционный	Гипс DENTAL PLASTER
ISO класс гипса	4	4	3	3	3	3	2
Пропорции смешивания Порошок (100г.) /вода (мл.)	20	22-24	23	30	28	30	45
Рабочее время смешивания (мин.)	~6	~8	~6	~6	~6	~9	~6
Время схватывания (мин.)	~10	~12	~10	~10	~10	~13	~10
Максимальное расширение	<0.09	<0.09	<0.15	<0.12	<0.10	<0.03	<0.2
Прочность на сжатие (через 1 час) - влажный	>55 МПа (561 kgf/cm <sup>2</sup> ) 7,977 psi	>41 МПа (418 kgf/cm <sup>2</sup> ) 5,947 psi	>46 МПа (469 kgf/cm <sup>2</sup> ) 6,672 psi	>27 МПа (275 kgf/cm <sup>2</sup> ) 3,916 psi	>31 МПа (316 kgf/cm <sup>2</sup> ) 4,496 psi	>20 МПа (204 kgf/cm <sup>2</sup> ) 2,901 psi	>14 МПа (143 kgf/cm <sup>2</sup> ) 2,031 psi
Прочность на сжатие (через 24 часа) - сухой	>95 МПа (969 kgf/cm <sup>2</sup> ) 13,779 psi	>83 МПа (846 kgf/cm <sup>2</sup> ) 12,038 psi	>87 МПа (887 kgf/cm <sup>2</sup> ) 12,618 psi	>55 МПа (561 kgf/cm <sup>2</sup> ) 7,977 psi	>59 МПа (601 kgf/cm <sup>2</sup> ) 8,557 psi	>35 МПа (357 kgf/cm <sup>2</sup> ) 5,076 psi	>28 МПа (286 kgf/cm <sup>2</sup> ) 4,061 psi

1. Пропорция вода/порошок согласно таблице
2. Смешивание:
  - 2.1 Время смешивания (в вакуумном смесителе):  
20-30 сек. при 350-450 об./мин.;
  - 2.2 Время смешивания (вручную): 30-60 сек.;
3. Залейте в форму и используйте вибростол для получения гладкой поверхности модели и удаления пузырьков воздуха.
4. Выньте из слепка через 40 мин. после отливки;

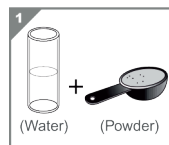


**Шаг 1.**  
Залейте дистиллированную воду в гипс.

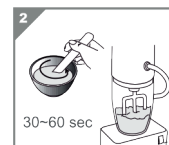

**Шаг 2.**  
Тщательно перемешайте от 30 до 60 секунд.



**Шаг 3.**  
Залейте в форму, и с помощью вибростолика удалите пузырьки для приданию однородности.

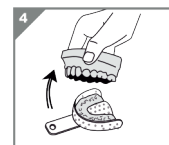


**Шаг 4.**  
Время удаления модели: извлеките модель из слепка через 40 минут.

# Паковочная масса для лабораторий

## SNOW VEST $\beta$

### Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса

Для бюгелей из сплавов драгоценных и недрагоценных металлов

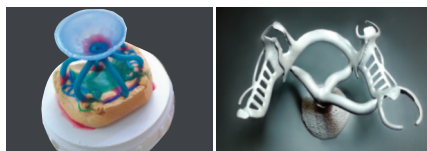

- Обеспечивает отличные результаты как при обычном, так и при быстром / ускоренном нагреве до 1050°C, а также подходит для дублирования гелем и силиконом.
- Предварительный нагрев с помощью шокового нагрева до 1000°C позволяет сэкономить рабочее время примерно на 20 ~ 30% по сравнению с обычными паковочными массами.
- Отличная посадка и высокая прочность краев идеально подходят для комбинированной работы.
- Простая и удобная работа за счет идеальной текучести.
- Сведенная к минимуму реакция между паковочной массой и сплавом.



Артикул:  
Порошок 10 кг + жидкость 1л:  
**DKM-SVB10(400)/SV1L**

### Варианты поставки:

- коробка 10кг массы (25 алюминиевых упаковок по 400г) + 1 литр жидкости (пластиковый флакон).

## SNOW VEST 3D

### Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса

Для использования вместе с выжигаемой 3D пластмассой и другими выжигаемыми материалами



- Обеспечивает отличные результаты как при обычном, ускоренном или "шоковом" нагреве до 950°C.
- Оптимальное расширение и прочность при выжигании 3D-пластмасс и других материалов
- Способна выдерживать быстрый нагрев.
- Высокая текучесть для облегчения паковки.
- Быстрая окупаемость.



Артикул:  
Порошок 12 кг + жидкость 3л:  
**DKM-SV3D12(400)/3D3L**

### Варианты поставки:

- коробка 12кг массы (30 алюминиевых упаковок по 400г) + 3 литра жидкости (пластиковый флакон).

## SNOW FINE

### Универсальная фосфатосодержащая паковочная масса

Для коронок и мостов



- Специальная безуглеродная паковочная масса для высокоточного литья коронок и мостов из всех стоматологических сплавов драгоценных и недрагоценных металлов при поэтапном, ускоренном или "шоковом" режиме нагрева при температуре до 900°C.
- Несмотря на высокий коэффициент расширения паковочной массы, литье отличается гладкой поверхностью и легко полируется, в особенности сплав Ni-Cr.
- Общий коэффициент расширения регулируется в пределах 2,5% за счет подбора кол-ва паковочной жидкости в массе.
- Благодаря превосходной текучести в процессе паковки не происходит образования пузырьков
- Легкое отделение массы от металла.



Артикул:  
Порошок 12 кг + жидкость 3л:  
**DKM-SF10/SF3L**

### Варианты поставки:

- коробка 12кг массы (30 алюминиевых упаковок по 400г) + 3 литра жидкости (пластиковый флакон). - порошок 150г; жидкость 2л.



# Физические характеристики / инструкция по применению паковочных масс DK MUNGYO

Наименование	Паковочная масса SNOW VEST B	Паковочная масса SNOW VEST 3D	Паковочная масса SNOW FINE
Метод нагрева	Быстрый / ускоренный и ступенчатый	Шоковый и ступенчатый	Шоковый и ступенчатый
Время нагрева мин./°C	90 мин. до 920°C	30 мин до 290°C, 30 мин до 580°C, 40 мин до 950°C	30 мин до 290°C, 30 мин до 580°C, 40 мин до 950°C
Пропорции смешивания порошок / вода	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Огнеупорная модель (по гелиновой форме) 100г : 15мл.</li> <li>2. Огнеупорная модель (по силиконовой форме) 100г : 17мл.</li> <li>3. Огнеупорная рубашка 100г : 18-19мл.</li> </ol> <p><b>Раствор:</b> (50% концентрат + 50% дист. вода).</p>	<p>Порошок : Жидкость = 100г : 24-26 мл рабочего раствора (концентрация жидкости для паковочной массы в рабочем растворе - 80%, концентрация дистиллированной воды в рабочем растворе - 20%).</p>	<p>Порошок / рабочий раствор 100г : 23-26 мл. рабочий раствор в пропорции дистиллированная вода / паковочная жидкость 2 : 8</p>
Время смешивания (мин.)	Внимание, рабочее время схватывания массы - короткое!!! Смешивание в вакууме 30-40 сек.	60 сек. в вакууме 15 сек. вручную	60 сек. в вакууме
Время схватывания (мин.)	5 ~ 7 минут*	5 ~ 7 минут*	5 ~ 7 минут*
Максимальное расширение (КТР)	0.7 - 1.85%	0.7 - 1.85%	1.2 - 2.4%
Твердость (МПа)	10-15МПа	10-15МПа	8-12МПа
Дополнительная информация	Подходит для дубликации гелем и силиконом	Подходит для дубликации гелем и силиконом	

\*Зависит от температуры окружающей среды



При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

## Альгинатные массы



### REGULAR SET (Стандартная)

### FAST SETTING (Быстрозастывающая)

#### Преимущества

- Короткое время смачивания водой (3 секунды).
- Беспыльный, быстрое замешивание до однородной массы без образования пузырьков, гладкая поверхность получившейся модели.
- Совместим с различными гипсами 4 класса.
- Под давлением альгинатная масса заполняет всю область слепка и обеспечивает четкую репродукцию деталей.

## Дмитрий Копылов

Врач-стоматолог, основатель, главный врач "Стоматологической клиники докторов Копыловых". Специалист в области прямой, непрямой реставрации зубов. С 2019 года член японской ассоциации цифровой стоматологии.

*«Minguo - это разумный баланс цены и качества. Она подходит как для рутинных процедур (например, изготовления временных конструкций), так и для более ответственных задач, где нужна высокая детализация. Я рекомендую её коллегам, особенно тем, кто только осваивает технику снятия альгинатных слепков: материал прощает небольшие ошибки и стабильно даёт хороший результат.»*



## Альгинатная слепочная масса **REGULAR SET**

(Стандартная)

Альгинат **SNOW ROCK**: обеспечивает гладкую поверхность гипсовых моделей и высокую точность воспроизведения рельефа, используется для изготовления протезов и диагностических моделей.

Характеристики	
Пропорции смешивания Порошок : вода	10г: 19-20 мл.
Время смешивания	30 сек.
Время заполнения оттисковой ложки	10 - 20 сек.
Время схватывания	3 мин. - 3 мин. 40 сек.
Общее время работы	3 мин. - 3 мин. 40 сек.

## Альгинатная слепочная масса **FAST SETTING**

(Быстрозастывающая)

Альгинат **SNOW ROCK**: с ускоренным временем застывания. Обеспечивает гладкую поверхность гипсовых моделей и высокую точность воспроизведения рельефа, используется для изготовления протезов и диагностических моделей.

Характеристики	
Пропорции смешивания Порошок : вода	10г: 19-20 мл.
Время смешивания	30 сек.
Время заполнения оттисковой ложки	10 - 20 сек.
Время схватывания	2 мин. - 2 мин. 40 сек.
Общее время работы	2 мин. - 2 мин. 40 сек.

## Альгинатная слепочная масса **COLOR CHANGING SET**

(С цветовой индикацией)

Альгинат **SNOW ROCK**: обеспечивает гладкую поверхность гипсовых моделей и высокую точность воспроизведения рельефа, используется для изготовления протезов и диагностических моделей.

Характеристики	
Пропорции смешивания Порошок : вода	10г: 19-20 мл.
Время смешивания	30 сек.
Время схватывания	2 мин. 40 сек. - 3 мин.
Время применения в ротовой полости	1 мин. 30 сек.

### Вариант поставки:

- Фольгированная упаковка массой 454 грамма.



При заказе ориентируйтесь по наименованию, цвету и варианту поставки. Наличие уточняйте у менеджера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.




# Сертификаты соответствия на продукцию DK Mungyo

**Сертификат соответствия**  
продукции требованиям  
технических регламентов  
SNOW ROCK UD (TYPE 4)




**Свидетельство**  
о регистрации  
мед. изделия (гипс)

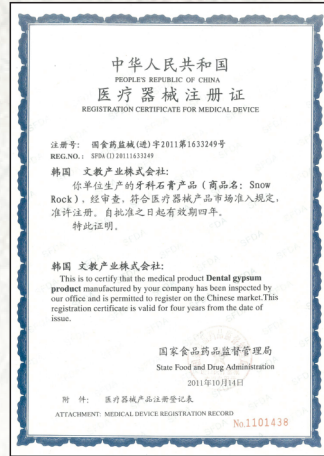


**Сертификат**  
соответствия  
ISO 9001 (MG-E&K ~2028.03)




**Заключение**  
о соответствии  
Беспыльный мел

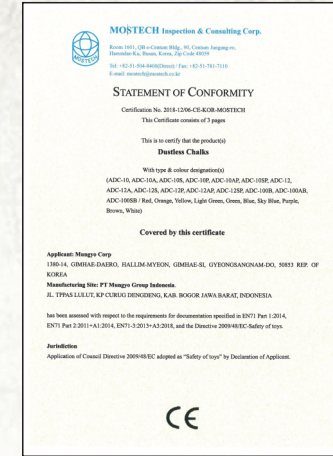


**Свидетельство**  
о регистрации  
товарного знака

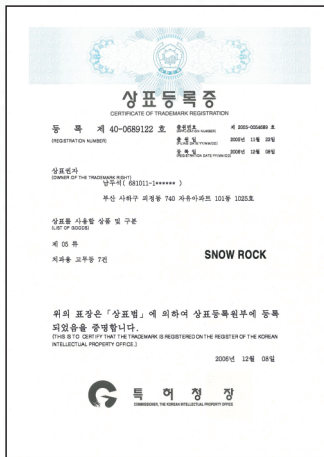

**Свидетельство**  
о регистрации иностранного  
производителя мед. изделий

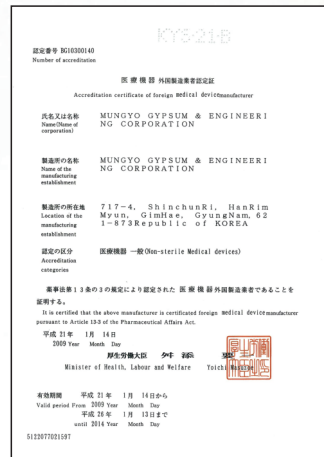


**Заклучение**  
о соответствии  
SNOW FINE, SNOW VEST,  
CRISTOBALITE

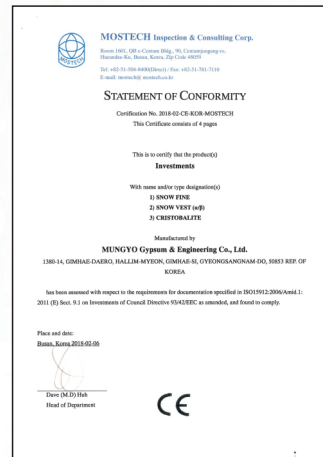

**Сертификат соответствия**  
продукции требованиям  
технических регламентов  
SNOW ROCK ND (TYPE 3)



**Лицензия**  
на производство  
мед. изделий

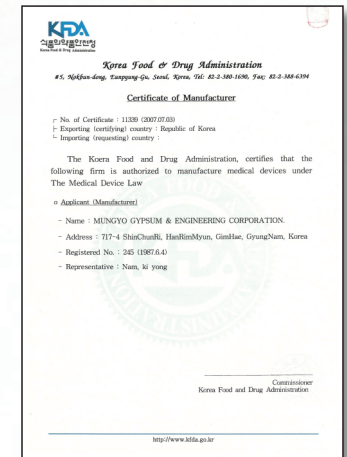

**80** Лет  
Качества

**snow-rock.ru**



**Дентал-Ист**

Стоматологические  
оборудование и материалы

ООО «Дентал-Ист» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.  
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-20  
E-mail: shop@dental-east.ru  
Сайт: www.dental-east.ru



Наш партнёр в РФ



интернет-магазин a3-dent.ru  
оборудование и материалы  
для стоматологии

**A3-DENT.RU**

ООО «Атридент» 125195, г. Москва,

Ленинградское шоссе, д. 96А.  
Тел./Факс: +7 (499) 745-63-01  
E-mail: shop@a3-dent.ru  
Сайт: www.a3-dent.ru



Наш партнёр в Казахстане



**Atri**

стоматологические материалы

ТОО «Атри» г. Алматы, ул. Макатаева 117, лит А,

офис 424 (Бизнес-центр "LOTOS").  
Тел. городской: +7 (727) 339-05-72  
Тел. сотовый: +7 (771) 747-99-05  
E-mail: shop@atri.kz, Сайт: www.atri.kz



Ред. №2 Февраль 2026г.

